

# C-Well

## Läätsevedelik


C-Well uudne mitmetoimeline  
niisutav läätsevedelik  
kõikidele pehmetele läätsedele



## MITMEOTSTARBELINE LAHUS NAATRIUMHÜALURONAADIGA

- Desinfitseerib, puhastab, eemaldab valkained, niisutab, loputab
- Maksimaalne niisutus
- Pikaajaline mugavus
- Pehmelele, sh silikoonhüdrokeelist valmistatud kontaktläätsedele

- Uue ja innovatiivse koostisega C-Well lätsevedelik sobib kõikidele pehmele lätsele, k.a. silikoonhüdrokeellätsele.
- Mitmeotstarbeline lätsevedelik sisaldab naatriumhüaluronaati, mida esineb loomupäraselt ka inimese enda kudedes – pisarakiles, nahas, liigestes jm. Naatriumhüaluronaat niisutab silmi ja aitab taastada lätse niiskustaseme. Kui varem on lätse kandmisel esinenud kuivustunnet, kipitust või punetust, aitab see hooldusvedelik neid ebameeldivusi vähendada.
- Vahend eemaldab lätsele kogunenud valgujäägid ja mustuse ning on desinfitseeriva toimega. Lätsele kogunenud valgud peab selle pinnalt korralikult eemaldama, kuna need tekitavad hõõrumistunnet ja vähendavad nägemisteravust. C-Well lätsevedelik suudab lätse korralikult puhastada, kui hoida neid ettenähtud aja jooksul konteineris.
- Tänu oma niisutavatele omadustele võimaldab C-Well lätsevedelik pikendada lätse silmashoidmise aega.

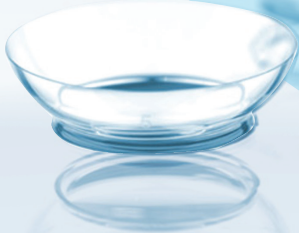

- C-Well lätsevedelik sobib ka tundlike silmade korral.
- Lätsevedeliku pH ehk happesuse näitaja on samane terve inimese pisaravedeliku pH näitajale. See on oluline silma loomupärase kaitse säilitamisel.
- Hooldusvedelikuga on kaasas bakteriostaatiline lätsekonteier, mis pidurdab lätse pinnalt pärit olevate mikroorganismide paljunemist.

## KASUTUSJUHEND

1. Enne kontaktlätse käitsemist peske käed.
2. Eemaldage üks kontaktlätse ja loputage seda paar sekundit.
3. Tilgutage kolm või neli tilka mitmeotstarbelist lahust lätsele ja puhastage seda, hõõrudes lätse õrnalt umbes 20 sekundit.
4. Valage lätsekarpi nii palju mitmeotstarbelist lahust, et lätse oleks karbis täielikult vedelikuga kaetud, ning pange seejärel äsjapuhastatud lätse karpi.
5. Eemaldage teine kontaktlätse ja tehke sellega sama.
6. Jätke kontaktlätse terveks ööks või vähemalt kuueks tunniks kinnisesse karpi, et need oleksid piisavalt desinfitseeritud.
7. Enne lätse kasutamist loputage neid uuesti paar sekundit lahusega.



Maaletooja:  
**AB Medical Group Eesti OÜ**

Reti tee 12  
Peetri alevik, Harjumaa  
Estonia

Tel: +372 663 0719

[www.cwell.ee](http://www.cwell.ee)

### KOOSTIS

Naatriumkloriid, boorhape, naatriumtetraboraat, naatriumsitraat, poloksameer 407, hüaluroonhape, dinaatriumedetaat, 0,02% ja polüheksametüleenbiguaaniid 0,0001% puhastatud vees.